




# 介護リフト用吊り具（スリングシート）の 「日常の点検」と「適切なお手入れ」を 必ず行ってください！

吊り具は消耗品です。劣化したり、古くなると危険です。

## 日常点検

布が裂けていたり、縫製部分の糸のほつれがないか、  
使う前に必ず点検してください。

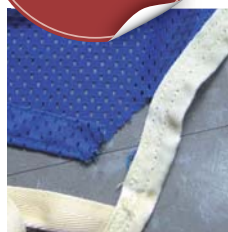

危険度 ★★★★★

吊布やベルトが裂けていたり、劣化がないか。

危険度 ★★★★★

縫製部分の糸のほつれや劣化がないか。

## 洗濯方法

漂白剤の使用は、生地やミシン糸を著しく劣化させます。  
洗濯方法は各メーカーの表示を参照してください。



注意度 ★★★★★


漂白剤を使用していない。

注意度 ★★★★★

洗濯の温度や乾燥機の注意。

注意度 ★★★★★

日陰干しで平干し。

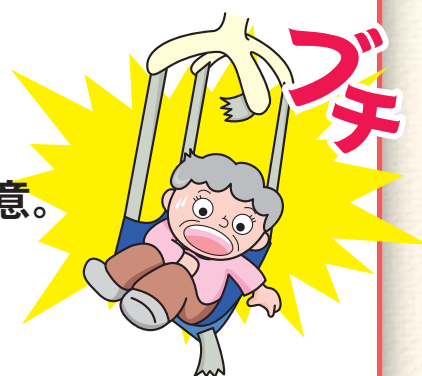

**⚠️ 漂白剤の使用は厳禁**

保管方法

直射日光を避けて保管してください。  
紫外線は生地やミシン糸を劣化させる原因となります。



JASPA リフト関連企業連絡会 Tel.03-3437-2623 Fax.03-3437-2624

ホームページアドレス... [http://www.jaspa.gr.jp/lift\\_consortium/index.html](http://www.jaspa.gr.jp/lift_consortium/index.html)

JASPAリフト

検索

